


# B. Braun Vet Care

## Ösophagostomie-Set nach von Werthern

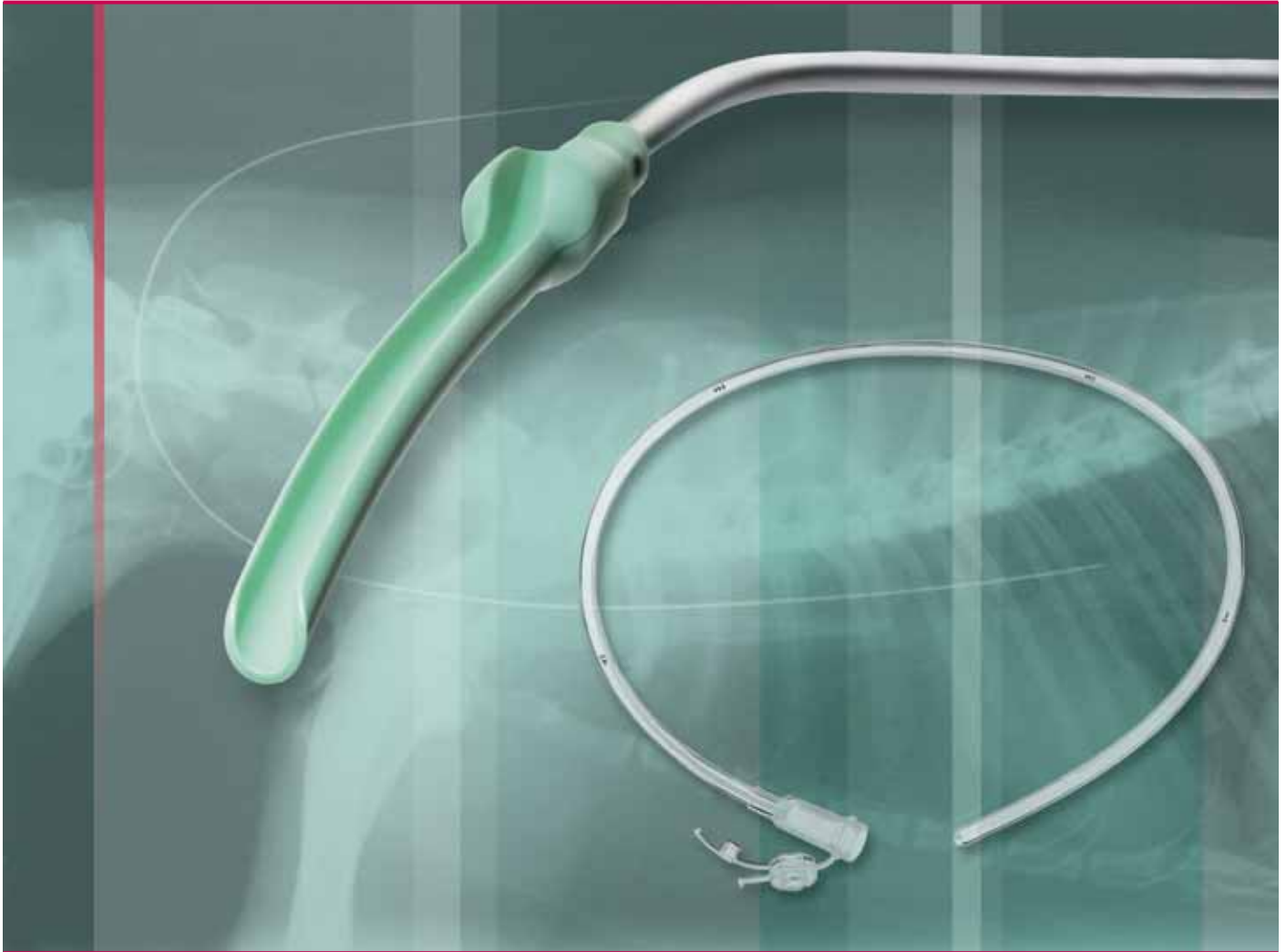

# Ösophagostomie-Set nach von Werthern

Sondeneinführer zur einfachen und schnellen Platzierung einer Ösophagussonde.

## Indikationen

- Frakturen oder Verletzungen im Kopfbereich
- Perioperative Ernährung von Traumapatienten
- Anorexie
- Feline hepatische Lipidose
- Chronischer Katzenschnupfen

Bei kritisch kranken Katzen stellt eine Ösophagussonde die Ernährung sicher.\* Mit dem Sondeneinführer nach von Werthern können Ernährungssonden nach dem Schuhlöffelprinzip direkt in aboraler Richtung, ohne aufwändige Verwendung eines Führdrahtes, platziert werden.

\* J Am Anim Hosp Assoc. 2003 May-June; 39(3):241-6

**Ösophagostomie-Set** bestehend aus 1 Sondeneinführer und 10 Sonden  
Art.-Nr. VC 810

**Ösophagus-Sonden** 10 Stück  
Art.-Nr. 2112409

Rinne zum Vorschieben der Ernährungssonde

Olive gewährleistet Retraktion der neurovaskulären Strukturen an der Inzisionsstelle

anatomisch geformter Sondengeber

## Tipps zur Sondenfütterung:

Katzen erhalten ca. 200-300 kcal/Tag einer flüssig-breiigen, lauwarmen Reconvaleszenzdiät. Die ersten 2 Tage werden alle 2-3 Stunden bis zu 15 ml der Tagesration, vorsichtig über einen Zeitraum von 5 Minuten verabreicht. Später können bis zu 60 ml 4 mal täglich langsam eingegeben werden.

Trotz Ösophagussonde können die Tiere Futter aufnehmen. Sobald die Nahrungsaufnahme den täglichen Erhaltungsbedarf deckt, kann die Sonde ohne erneute Narkose gezogen werden. Die Wundheilung erfolgt sekundär.

## B. Braun Ösophagus-Sonde aus Polyurethan

- Das thermoplastische Polyurethan ist besonders gewebeschonend und dadurch auch für den Langzeiteinsatz geeignet.
- Ein eingebetteter Röntgenkontraststreifen erlaubt die Lagekontrolle der Sonde.
- Für die speziellen Anforderungen bei der Sondenernährung ist die Sonde mit einem Trichteransatz und einem zweigeteilten Verschluss ausgestattet. Breiiges Futter wird über den Trichteransatz appliziert. Das Nachspülen der Sonde oder die Applikation von dünnflüssiger Nahrung, Wasser oder Medikamenten erfolgt durch den Luer-Ansatz im Verschluss der Sonde.
- Die Sonde ist für die Verabreichung von industriell gefertigter Intensivnahrung geeignet.
- 50 cm lang
- Außendurchmesser 4,8 mm/CH: 15
- einzeln steril verpackt

### Tipps zur Sondenpflege:

Vor und nach der Futtereingabe bzw. alle 4-8 Stunden sollte die Sonde mit frischem, körperwarmem Leitungswasser gespült werden. Verstopfte Sonden können mit kohlensäurehaltigen Getränken gespült werden. Die Spülung sollte vorsichtig unter angemessenem Druck erfolgen.

### Verschlusskappe mit Luer-Ansatz



### Trichteransatz



### Röntgenkontraststreifen



### Längengraduierung



### Abgerundete Spitze mit seitl. Öffnungen



# OP-Anleitung



1

Instrumentarium und Verbandsmaterial für den Eingriff.



2

Intubierte Katze in rechter Seitenlage positionieren und linke Halsseite aseptisch für die Operation vorbereiten.



5

Sondeneinführer um 110° im Uhrzeigersinn drehen. Die Rinne in der Olive ist jetzt Mitte des Halses tastbar.



6

Hautinzision ca. 2 cm lang über der Olive.



9

Sonde in aboraler Richtung bis zur vorher angelegten Markierung einführen. Sondeneinführhilfe in Ausgangsposition drehen (Röntgenologische Lagekontrolle der Sonde).



10

Sonde mit gedoppeltem Klebeband befestigen und Laschen mittels Hautheft fixieren. Inzisionsstelle mit einer antiseptischen Salbe und Gaze abdecken.



3

Abmessen der Sondenlänge und Markierung mit wasserfestem Stift auftragen, damit die (implantierte) Sondenspitze später vor der Kardia liegt (8. ICR).



4

Sondeneinführer in den Ösophagus einführen bis die Olive in der Mitte des Halses lateral palpierbar ist.



7

Halsmuskulatur stumpf präparieren bis die weißliche Ösophaguswand zu sehen ist.



8

Ösophagus mittels Stichinzision eröffnen.



11

Ösophagussonde nach kaudal umbiegen und mit einem sehr lockeren Halsverband abdecken.



12

Nach dem vollständigem Erwachen aus der Narkose mit der Fütterung beginnen.



AESCULAP®

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**B. Braun Vet Care GmbH**

Am Aesculap-Platz  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

Telefon +49 7461 95-2191  
Fax +49 7461 71512

[www.bbraun-vetcare.de](http://www.bbraun-vetcare.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur  
Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck,  
auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme  
der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.